

wellion[®] CALLA*mini*

**BRUKS-
ANVISNING**



Kära Wellion CALLA Mini ägare,

Tack för valet av Wellion CALLA Mini blodsockermätare. För att hjälpa dig att övervaka din blodsockernivå designade vi Wellion CALLA Mini blodsockermätare att vara noggrann och enkel att använda.

Din nya Wellion CALLA Mini blodsockermätare är utformad med bekvämlighet och precision i åtanke för att göra ditt liv enklare. No Code funktionen eliminerar kodningsfel och ser till att dina testresultat är korrekta vid varje prov. All information som behövs för att använda och underhålla din nya mätare finns med i den här handboken. Läs den noga.

Wellion CALLA Mini blodsockermätare är en bärbar batteridrivna mätare avsedd att användas som ett hjälpmedel för personer med diabetes och för sjukvårdspersonal för att övervaka glukoskoncentrationen i helblod.

Avsedd användning: Wellion CALLA Mini blodsockermätare är avsedd för kvantitativ mätning av glukos i färskt kapillärt helblodsprov som tas

från fingertopparna. Testning sker utanför kroppen (in vitro-diagnostik). Wellion CALLA Mini blodsockermätare är avsedd för både självtestning av personer med diabetes och professionell användning av sjukvårdspersonal i en klinisk miljö, som ett stöd för övervakning av glukosnivåer i diabetes mellitus. Den är inte avsedd för diagnos av diabetes eller för neonatal användning.

VIKTIGT:

- Uttorkning - Allvarlig uttorkning kan leda till felaktiga blodsockertestresultat. Om du misstänker att du är allvarligt uttorkad, kontakta din läkare omedelbart.
- Hematokritnivå - En hematokritnivå som är högre än 55% eller lägre än 30% kan orsaka felaktiga blodsockertestresultat.
- Ej avsedd för användning på nyfödda.
- Patienter som genomgår syrgasbehandling kan få felaktiga resultat.

Om du har frågor eller helt enkelt behöver mer information, vänligen kontakta vår auktoriserade representant eller besök vår webbplats på www.medtrust.se.

Tack igen för valet av Wellion CALLA Mini blodsockermätare.

DIN NYA BLODSOCKERMÄTARE

Ditt Wellion CALLA Mini blodsockermätningsspaket innehåller följande:

Wellion CALLA Mini blodsockermätare


Wellion Blodprovstagare

10 Wellion Lansetter

Liten väska

Bruksanvisning

Wellion CALLA Mini mätare

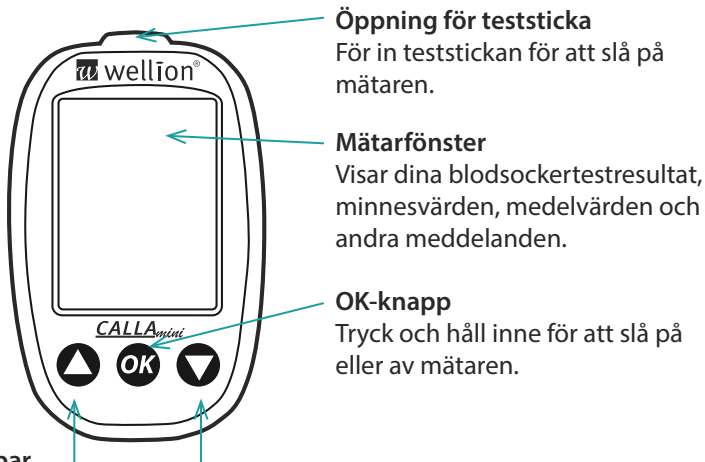

Öppning för teststicka

För in teststickan för att slå på mätaren.

Mätarfönster

Visar dina blodsockertestresultat, minnesvärden, medelvärden och andra meddelanden.

OK-knapp

Tryck och håll inne för att slå på eller av mätaren.


Pilknappar

Tryck på pilknapparna för att gå in i inställningsläge under, för att navigera genom lagrade testvärden och medelvärden eller när du ställer in mätaren.

Wellion CALLA Mini mätare

Batterifack

Innehåller ett 3V litiumbatteri (CR2032).

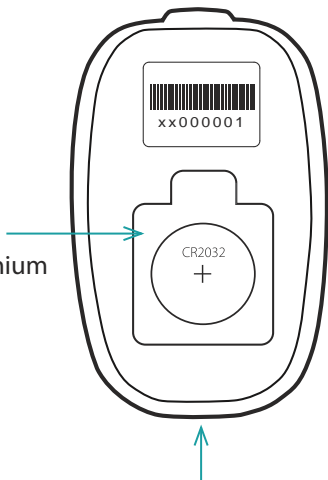

Dataanslutning

Anslut datakabeln för att överföra resultaten till en dator (datakabel och programvara säljs separat *).



* Korrekt läsning av data kan endast säkerställas med en original Wellion CALLA USB-kabel med mikro-USB-kontakt.

Wellion CALLA teststicka för blodsocker

Öppning för blodprov
Applicera blod eller
kontrolllösning här



Kontaktpunkter
Sätt denna ände i öpp-
ningen för teststickor på
mätaren.


Wellion CALLA teststickor är glukosspecifika, biosensor-baserade testrem-sor som kan testa glukos i kapillärt helblod så snabbt som på 6 sekunder och kräver mycket litet blod.

No Code funktionen eliminerar fel i testet på grund av felaktig kodning eller kalibrering. Testresultatet är plasmarefererat för enkel jämförelse med labbresultat. Mätaren har en avkänning för underfyllning som varnar dig när det inte finns tillräckligt med blod för att utföra ett test, så att du kan försäkra dig om att varje avläsning du får är ett korrekt och meningsfullt resultat.

△ VIKTIGT:


- Var noga med att endast använda Wellion CALLA blodsockerteststicka med Wellion CALLA Mini blodsockermätare. Andra märken av teststickor fungerar inte med mätaren.
- Wellion CALLA teststickor är känsliga för fukt och ljus, därför är det viktigt att stänga locket på teststicksburken omedelbart och ordentligt efter varje användning. Förvara oanvända testremсор i originalburken. Lämna inga teststickor utanför burken när den inte används.
- Återanvänd INTE teststickor. Teststickorna är endast avsedda för engångsbruk.
- Kassera noggrant använda teststickor och lansetter i rätt avfallsbehållare.

Mätarfönster

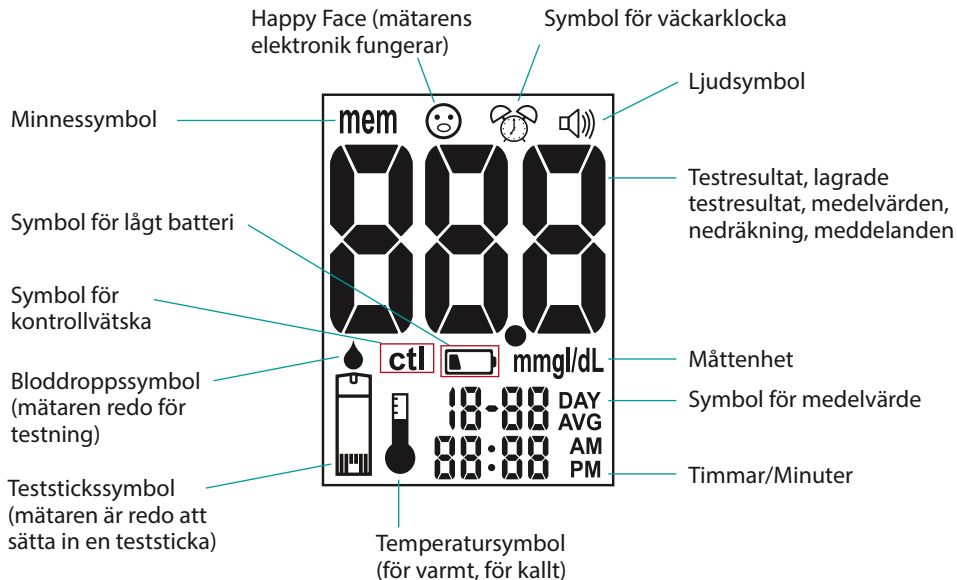

STÄLL IN DITT NYA SYSTEM

Sätta i (eller byta) batteriet

Batterierna måste sättas in innan du använder din Wellion CALLA Mini mätare för första gången eller när batterisymbolen  Visas på mätarens display.

Material som du behöver:

Din Wellion CALLA Mini mätare


Ett CR2032 3V knappcells batteri (följer med)

Steg 1:

Öppna batteriluckan.

Steg 2:

Sätt i ett nytt batteri till batterifacket med „+“ vänt uppåt Sätt tillbaka batteriluckan i mätaren ordentligt.

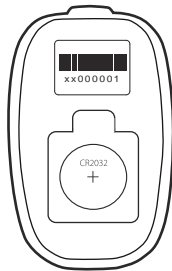

△ OBSERVERA:

- Datum och de lagrade resultaten kommer inte att raderas när batterierna bytas .
- När du byter batteri, uppmanar mätaren automatiskt att du ska kontrollera tid och datum, när du slår på mätaren eller sätter i en teststicka. Om tid och datum är korrekt, tryck på OK . Om tid och datum inte är korrekt, justera dessa.
- Kassera använda batterier enligt gällande bestämmelser.

Inställning av klockan

Material du behöver:
Din Wellion CALLA Mini

⚠ OBSERVERA:

- Om datum och tid på Wellion CALLA Mini mätaren inte har ställts in, kommer test-eller kontrollresultat inte att lagras i mätarens minne.

Steg 1: Tryck och håll in OK-knappen för att slå på mätaren.

Steg 2: Släpp OK-knappen och mätaren kommer att köra en systemkontroll automatiskt. "😊" visas på displayen innan du går in i huvudläge.

Om ett felmeddelande visas, se avsnittet "Lösa problem".

Efter att en blinkande symbol för teststicka visas på skärmen, tryck på pilknappen ▲ två gånger tills du kan se klocksymbolen 🕒.

Steg 3 – Ställ in år:

Tryck på OK för att gå in i datum och tid-läget. År kommer att blinka. Använd ▲ eller ▼ knapparna för att välja rätt år. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val och gå vidare för att ställa in månad.

Steg 4 - Ställ in månad:

Den aktuella månaden blinkar. Använd ▲ eller ▼ knapparna för att välja rätt månad. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val och gå vidare för att ställa in dag.

Steg 5 – Ställ in dag:

Den aktuella dagen blinkar. Använd ▲ eller ▼ knapparna för att välja rätt dag. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val och gå vidare för att ställa in tidsformatet.

Steg 6 - Välj tidsformat (12h/24h): Tidsformatet blinkar. Använd ▲ eller ▼ knapparna för att välja tidsformat. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val och gå vidare för att ställa in timme.

Steg 7 - Ställ in timme:

Den aktuella timmen blinkar. Använd ▲ eller ▼ knapparna för att välja rätt timme. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val och för att avancera att ställa in minuterna.

Steg 8 - Ställ minuter:

Den aktuella minuten blinkar. Använd ▲ eller ▼ knapparna för att välja rätt minuter. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val och avsluta tidsinställningen .

Sätt i en teststicka och börja testa, eller stäng av mätaren genom att trycka och hålla OK-knappen tills fönstret visar OFF.


⚠ OBSERVERA:



- När som helst även under inställningarna, kan man starta ett test genom att sätta i en teststicka. De ändringar du har gjort hittills kommer att memoreras i mätaren.

Sätta PÅ/STÄNGA ljud

Wellion CALLA Mini mätaren levereras med ljud PÅ som förval. Stänga av ljudet kommer leda till att du missar viktiga meddelanden från din mätare - t.ex. bekräftelse eller felmeddelanden.

Material du behöver: Din Wellion CALLA Mini mätare

Steg 1: Bläddra igenom inställningarna tills du kommer till ljudinställning, tryck på OK knappen för att välja ljudinställning. Ljudsymbolen  syns och aktuell ljudstatus visas på skärmen.

Steg 2: Använd  eller  för att slå på eller av ljudet. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.

Sätt i en teststicka och börja testa, eller stäng av mätaren genom att trycka och hålla OK-knappen tills displayen visar OFF.

⚠ OBSERVERA:

- När som helst, även under inställningarna, kan man starta ett test genom att sätta i en teststicka. De ändringar du har gjort hittills kommer att memoreras i mätaren

Inställning av alarm

Din Wellion CALLA Mini mätare har 3 ställbara alarm. Alla alarm är förinställda som avstängda. Följ instruktionerna nedan för att ställa in dina alarm.

Material du behöver:

Din Wellion CALLA Mini mätare

Steg 1: Tryck på ▲ eller ▼ knapparna i inställningsmenyn tills alarmsymbolen blinkar.

Steg 2: Tryck på OK-knappen och ange inställning för Alarm 1.

Steg 3: Den faktiska statusen (AV / PÅ) blinkar. Tryck på ▲ eller ▼ för att ändra inställning och slå på / av Alarm 1

Steg 4: Om PÅ har valts och du trycker på OK, kommer du fortsätta med att ställa in timmen. Tryck på ▲ eller ▼ för att ändra timme. Tryck på OK för att bekräfta ditt val.

Steg 5: Tryck på ▲ eller ▼ för att ändra minut. Tryck på OK för att bekräfta ditt val.

⚠ OBSERVERA:

- Om du väljer OFF och OK-knappen trycks in, kommer du fortsätta att ställa in nästa larm.
- Efter att ha lämnat inställningarna, kommer alarmsymbolen att framträda permanent för att indikera att alarm är inställt.

TEST MED KONTROLLÖSNING

Syftet med kontrollösningstest är att validera prestanda på Wellion CALLA Mini blodsockermätning med hjälp av testlösning med en känd nivå av glukos.

Det rekommenderas att utföra kontrollösningstest när:


- Mätaren används för första gången
- Du öppnar en ny burk med teststickor
- Du lämnade locket på teststicksburken öppen en längre stund
- Du tappade mätaren
- Du misstänker att mätaren och teststickorna inte fungerar ordentligt
- När blodsockertestresultatet inte återspeglar hur du känner dig
- Du vill öva testproceduren


Material som du behöver:

Din Wellion CALLA Mini mätare

Wellion CALLA kontrollösning Level 0/1/2

△ VIKTIGT :

- Använd endast Wellion CALLA Glukos kontrollösning för Wellion CALLA teststickor. Andra märken av kontrollösning kommer att ge felaktiga resultat.
- Kontrollera alltid utgångsdatum . Använd INTE kontrollösningar om datumet löpt ut
- Markera den nyöppnade flaskan med kontrollösning med det datum då den öppnas, kassera oanvänd kontrollösning tre månader efter öppnandet.
- FÅR EJ FRYSAS. Förvara kontrollösningar i rumstemperatur
- Använd inte teststickor som har gått ut. Kontrollera utgångsdatum som är tryckt på burken för teststickor och förpackningen.
- Använd alltid teststickan omedelbart efter att den tagits ut ur burken
- Efter att en teststicka tagits ut ur burken, sätt på locket och stäng det ordentligt.
- Använd inte blöta, böjda, repade eller skadade testremsor.
- Förvaras avskilt från direkt solljus och värme. Förvara teststicksburken på en torr, sval plats.

- Anteckna på etiketten på burken med teststickor när du först öppnade den. 6 månader efter öppningsdagen, kassera burken och eventuella återstående teststickor.
- Se till att du testar på mellan 10°C - 40°C. Om mätaren visar , flytta mätaren in till en miljö där temperaturen är mellan 10 ° C - 40 ° C och avvakta 10 till 15 minuter för den att nå den nya temperaturen före användning. Din mätare kommer inte att börja testa om det är utanför detta temperaturområde.

En ny Wellion CALLA teststicka

Steg 1: Sätt i en Wellion CALLA teststicka i mätaren. Se till att teststickans kontaktpunkter infogas hela vägen in i mätaren. Stäng teststicksburken omedelbart efter att du tagit ut en sticka.

Steg 2: “☺” visas på skärmen. Vänta på tills symbolerna teststicka och blinkande bloddroppe visas på mätarens display.

Steg 3: Placera en droppe Wellion CALLA kontrollösning på en ren, torr, icke absorberande yta. Applicera inte kontrollösning på teststicker direkt från flaskan. Sätt tillbaka kapsylen på flaskan med kontrollösning omedelbart efter användning.

Steg 4: Håll mätaren och låt kanten på teststicker nudda kontrollösningen. Lösningen kommer automatiskt att sugas in i reaktionsområdet på teststicker. Håll kvar mätaren tills det piper.

Steg 5: Skärmen kommer att räkna ner. Efter 6 sekunder kommer testresultatet för kontrollösning att visas på mätarens display.

Steg 6: Jämför avläsningen på skärmen med motsvarande nivå tryckt på teststicksburken eller förpackningen. Om avläsningen inte faller inom intervallet tryckt på teststicksburken eller förpackningen, se kapitel „Kontrollösning Felsökning“.



Steg 7: Avlägsna och kassera den använda teststickan i därför avsett kärl. Mätaren stängs av automatiskt efter att testremsan har avlägsnats eller stängs av efter 1,5 minuter av icke-användning.

Testa andra nivåer av kontrollösning genom att upprepa stegen ovan.

△ OBSERVERA:

- Testresultat med kontrollösning lagras i mätarens minne och är markerade med ctl.
- **Test med kontrollösning kommer inte att användas för att beräkna medelvärden.**
- Återanvänd **INTE** teststickor.

Kontrollösning Felsökning

Om ditt kontrollösningstest är utanför intervallet (för hög eller för låg), beror det kanske på följande:

Möjliga orsaker	Vad du kan göra ...
<ul style="list-style-type: none">• Fel märke av kontrollösning används• Kontrollösning är inte i rumstemperatur• Utgången eller förorenad kontrollösning• Skadad testremsa• Funktionsfel mätare	<ul style="list-style-type: none">• Se till att du använder Wellion CALLA kontrollösning.• Se till att testmiljön är mellan 10°C till 40°C.• Kontrollera utgångsdatumet på öppningsdatum flaskan med kontrollösning och burken med teststickor. Upprepa testet med en ny teststicka. Om resultatet fortfarande är utanför tillåtet intervall, använd en ny flaska med kontrollösning och testa igen.• Om problemet kvarstår, kontakta våra auktoriserade återförsäljare.

TESTA DITT BLODSOCKER

Efter varje start av mätaren kommer det automatiskt att utföras en systemkontroll.


Material som du behöver:

Din Wellion CALLA Mini mätare


En ny Wellion CALLA teststicka

Blodprovstagare med en ren, oanvänd lansett


Innan du börjar, se till att:

- Ställ in din mätare ordentligt och kör en kontrolltest. Se kapitlet "Ställ in ditt nya system", och "Test med kontrollösning" för detaljer.
- Tvätta händerna och stickstället noggrant med tvål och varmt vatten och torka väl.
- Du testar i ett område mellan intervallen 10°C temperatur till 40°C. Mätaren kommer inte att testas utanför detta område och kommer att visa  . Flytta mätaren in i en miljö som är mellan 10°C och 40°C och avvakta i 10 till 15 minuter innan du testar igen.


Förbered din blodprovstagare

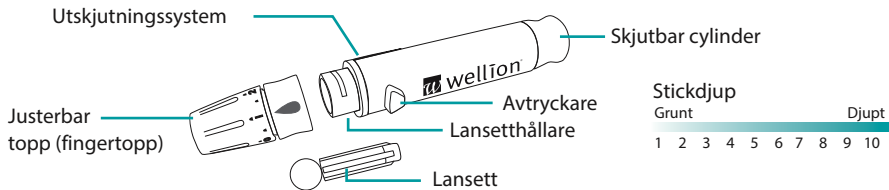

Steg 1: Skruva av den justerbara toppen på blodprovstagaren och sätt i en ny lansett genom att trycka ner den ordentligt till stopp.

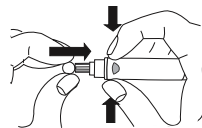


Steg 2: Vrid loss skyddet på lansetten. Skruva tillbaka toppen på blodprovstagaren.

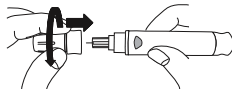


△ NOTERA:

- För tester på fingrarna, använd den justerbara toppen.

Steg 3: Justera stickdjupet på toppen till rätt läge (1 är det grundaste stickdjupet och 10 det djupaste).

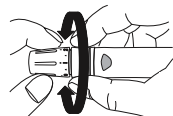

Steg 4: Håll blodprovstagaren i ena handen, dra tillbaka spärrarmen med den andra handen tills du hör ett klickljud och blodprovstagaren är klar att användas. Frigöringsknappen är nu färgad röd, så du enkelt kan kontrollera om blodprovstagaren är redo för provtagning.

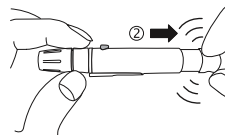

Om avtryckaren inte visar rött, dra tillbaka spärrarmen igen tills frigöringsknappen ändrar färg till rött.

△ VIKTIGT:

- Använd en ny steril lansett varje gång du testar dig för att undvika kontaminering och smittorisk. Om du använder spritsudd för att göra rent fingret, se till att fingret torkat ordentligt innan du testar dig.

Genomför ett blodsockertest


Steg 1: Ta ut en Wellion CALLA teststicka från teststicksburken och stäng burken omedelbart. För in teststickan för att slå på mätaren. Vänta tills symbolen med teststicka och blinkande bloddroppe visas på mätarens display.

⚠ VIKTIGT:

- Använd inte teststickor där sista utgångsdatumet har passerats. Kontrollera sista utgångsdatumet på burken med teststickorna och förpackningen.
- Använd genast den teststicka du tagit ut ur burken.
- Använd inte blöta eller skadade teststickor.
- Utsätt inte burken med teststickor för direkt solljus eller värme. Förvara burken med teststickorna på ett torrt och svalt ställe.
- Anteckna på burketiketten när du öppade burken för första gången. 6 månader efter att du först öppnade burken skall den slängas tillsammans med kvarvarande teststickor.

Steg 2 - test från fingertoppen:


Håll blodprovstagaren mot sidan av fingertoppen och tryck på avtryckningsknappen för att sticka hål på fingret.

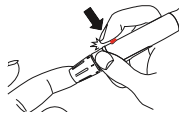

△ TIPS:

- Massera försiktigt handen och fingret mot stickstället för att få fram en droppe blod. "Mjölka" inte eller kläm runt stickstället.
- Stick på sidan av fingret som du inte når med din tumme för att undvika ömma fingrar. För att undvika förhårdnader, byt finger varje gång.

Steg 3: För försiktigt teststikan till blodsdroppen i vinkel. Teststikan suger upp blodet genom kapillärkraft. Håll teststikan kvar i blodsdroppen tills mätaren piper och indikerar att teststikan har fått tillräckligt med blod för att genomföra testet.

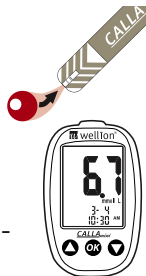

Steg 4: Displayen räknar ner och efter 6 sekunder visas ditt blodsockertestresultat i displayen.

⚠ FÖRSIKTIGHET:

- Om du ser "HI" eller "LO" i displayen så är ditt blodsocker över 33,3 mmol/L eller under 1,1 mmol/L. Testa igen och använd en fingertopp. TESTA INTE på underarmen. Om resultatet fortfarande är detsamma, ring omedelbart till din vårdgivare.

Steg 5: Tag ur den använda teststickor och släng den i avsedd förpackning. Mätaren stängs av automatiskt.

Steg 6: Avlägsna den använda lansetten från blodprovstagaren. Du kan använda utskjutaren för att undvika nålsticksskador. Tryck utskjutaren framåt med tummen och dra samtidigt lansethållaren bakåt för att ta ut den använda lansetten. Släng lansetten i därför avsett kärl.

⚠ VIKTIGT:

Kasta använda teststickor och lansetter i enlighet med dina lokala gällande bestämmelser i tillämpliga fall.

FÖRSTÅ DITT TESTRESULTAT

Blodsockervärdet varierar beroende på födointag, medicin, hälsa, stress och motion. Den ideala intervallet för vuxna utan diabetes bör vara:

- Mindre än 100 mg/dL (5,6 mmol/L) före måltid och
- Mindre än 140 mg/dL (7,8 mmol/L) efter måltid¹

Det är viktigt att rådgöra med din läkare eller sjukvårdspersonal för att bestämma lämpligt målintervall för dig.

Reference:

1. American Diabetes Association Position Statement: Standards of Medical Care in Diabetes - 2010. Diabetes Care 2010; 33 (Suppl.1): S11-S61.

Vad gör du om du får ett för högt eller för lågt resultat?

Om mätaren visar resultat som är markerade med „HI“ eller „LO“, eller du får ett resultat som är över 13,9 mmol/L eller under 2,8 mmol/L OCH du känner dig sjuk:

- Behandla dina diabetes enligt instruktionen från din läkare och / eller kontakta din läkare.

Om mätaren visar resultat som är markerade med "HI" eller "LO", eller du får ett resultat som är högre än 13,9 mmol/L eller under 2,8 mmol/L och du INTE känner dig sjuk:

- Testa din mätare med en kontrollösning, se kapitel "Test med kontrollösning".
- Testa igen med fingertoppen
- Får du fortfarande ett för högt eller för lågt resultat, kontakta din sjukvårdspersonal.


VISNING AV SPARADE MÄTNINGAR 7, 14, 21 SAMT 30 DAGARS MEDELVÄRDEN

CALLA Mini mätaren lagrar automatiskt upp till 300 test-och kontrollresultat med datum och tid. Dessutom ger mätaren alltså 7, 14, 21 och 30 dagar i genomsnitt för att hjälpa dig att bättre kunna hålla koll på din blodsockernivå. Du måste ställa in din mätarens datum och tid för att använda minne och medelvärdesfunktion, se kapitel "Ställ in ditt nya system". Mätaren kommer inte ihåg några test-eller kontrollresultat om datum och tid inte är inställda.

Material som du behöver:

Din Wellion CALLA Mini mätare

Steg 1: Slå på mätaren genom att trycka och hålla knappen OK. "☺" visas på skärmen innan huvudläget. Efter att den blinkande teststicksymbolen visas trycker du på pilknappen ▲

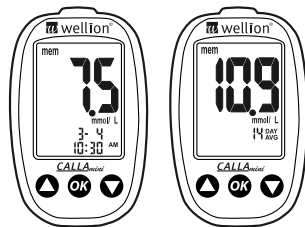

en gång, och "mem" visas i det övre vänstra hörnet av skärmen. Tryck på "OK" för att välja "mem"-läge.

Steg 2: Mätaren visar det senast sparade resultatet. Tryck på knappen ▲ för att bläddra igenom resultat.

"Nil" visas om det inte finns några sparade testresultat i minnet

Steg 3: Tryck på knappen ▼ för att bläddra till medelvärdet. Det första genomsnittsvärdet kommer att vara värdet för 7 dagar. Fortsätt att trycka på ▼ för att bläddra igenom 14, 21 och 30 dagars genomsnitt

Steg 4: Tryck och håll in OK-knappen för att stänga av mätaren när du är klar eller infoga en teststicka för att börja testa.

△ OBSERVERA:

- Kontrolltestresultat markeras med "CTL" i det nedre vänstra hörnet av skärmen i tillägg till "mem".
- Kontrolltestresultat kommer inte att ingå i medelvärden.
- "Nil" visas om det inte finns några sparade testresultat i minnet
- När det inte finns några medelvärden, kommer displayen visa tre streck.
- Om minnet redan har 300 testresultat, kommer ett nytt test att läggas till och det äldsta att raderas.
- Sparade testresultat och medelvärden raderas inte när du byter batterier

VÅRD AV MÄTAREN

Skötsel av din CALLA Mini mätare är lätt. Följ dessa enkla riktlinjer och din mätare fungerar som den ska.

Rengöra mätaren

- Om mätaren blir smutsig, använd en fuktig (inte våt) luddfri trasa fuktad med ett mildt rengöringsmedel.
- Få inte vatten in i CALLA Mini mätaren. Sänk aldrig ner mätaren i vatten eller håll den under rinnande vatten.
- Använd inte glas eller rengöringsmedel på mätaren.
- Försök inte att rengöra teststicksöppningen.
- Förorena inte öppningen med blod eller kontrollösning



Förvaring och försiktighetsåtgärder




- Hantera mätaren varsamt – hård stöt, såsom att tappa mätaren, kan skada elektroniken.




- Mätaren och testremsorna är utformade för att användas inom temperaturområdet 10°C till 40°C.
- Undvik att lämna mätaren i extremt varm eller kall miljö, t.ex. nära en värmekälla eller i en extremt varm eller kall bil.
- Förvara eller använd inte mätaren eller teststickorna i hög luftfuktighet, såsom badrum eller kök.
- Sätt alltid tillbaks locket direkt efter att ha tagit ut en teststicka och se till att det är ordentligt stängt.
- Ta inte isär mätaren. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår tekniska problem eller frågor, ring vår auktoriserade återförsäljare för hjälp.
- Använd inte mätaren i en torr miljö, särskilt inte om syntetiska material finns i närheten. Syntetiska kläder, mattor, etc., kan orsaka skadlig statisk elektricitet i en torr miljö.
- Använd inte mätaren nära mobil- eller trådlösa telefoner, walkie-talkies, garageportsöppnare, radiosändare, eller elektrisk utrustning som är källor för elektromagnetisk strålning, eftersom dessa kan störa användningen av mätaren.

PROBLEMLÖSNING

Detta avsnitt beskriver meddelanden och felkoder som du kan stöta på när du använder din Wellion CALLA mini-mätare och teststickor.

Vad du ser	Vad det betyder	Vad du ska göra
	Minnesfel	<ul style="list-style-type: none"> • Ta ur batteriet och starta mätaren igen • Ta bort teststickan och sätt i en ny teststicka i mätaren. • Om problemet kvarstår, kontakta den lokala distributören.
	Teststicksfel	<ul style="list-style-type: none"> • Ta bort teststickan och sätt i en ny teststicka i mätaren. • Upprepa testet med en ny teststicka. Vänta tills du ser den blinkande bloddroppen innan du tillsätter blodprov eller kontrollösning. • Om problemet kvarstår, kontakta den lokala distributören.

	<p>Inte tillräckligt med blod</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ta bort teststicken och upprepa testet med en ny teststicka. Se kapitlet "Utföra ett blodsockertest"
	<p>Testresultatet är högre än 33,3 mmol/L</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tvätta och torka händerna och upprepa testet med en ny teststicka. Om resultatet fortfarande är HI, kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal.
	<p>Testresultatet är lägre än 1,1 mmol/L</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tvätta och torka händerna och upprepa testet med en ny teststicka. Om resultatet är fortfarande är LO, kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal.

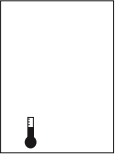	Lågt batteri	<ul style="list-style-type: none">• Byt batteri enligt kapitel "Sätta i (eller byta) batteriet"
	Det finns inga resultat lagrade i mätaren	<ul style="list-style-type: none">• Börja testa ditt blodsocker, se kapitel "Utföra ett blodsockertest"
	Test har utförts utanför temperaturområdet.	<ul style="list-style-type: none">• Flytta mätaren till en miljö som är mellan 10°C och 40°C och avvakta i 10 till 15 minuter innan den nått rätt temperatur.

TILLVERKARGARANTI

Producenten garanterar Wellion CALLA mini blodsockermätare mot fel i material och utförande under en period av två år från inköpsdatum. Garantin är förlorad om instrumentet missbrukas, underhålls dåligt eller manipuleras.

Ansvar under denna garanti är begränsad till reparation av defekta delar eller - efter beslut av producenten - till utbyte av instrumentet. Rätten att häva köpeavtalet föreligger endast om även ersättning visar sig vara defekt. Andra anspråk än dessa kommer inte att behandlas.

Tillverkarens ansvar är begränsat till reparation eller utbyte och inte i något fall skall tillverkaren vara ansvarig för följskador eller förlust eller säkerheter.

Garantin gäller inte om skadan beror på felaktig användning, försummelse, otillåten modifiering eller reparation, misshandel, manipulering, mänskliga misstag eller användning under extrema förhållanden. Denna garanti utesluter uttryckligen förbrukningsmaterial. Garantitiden kan inte förlängas.

SPECIFIKATIONER

Teststickor:	Wellion CALLA Teststickor för blodglukos
Testområde:	1,1-33,3 mmol/L
Kalibrering :	Plasma
Testtid:	6 sekunder
Provstorlek :	0,65 µl
Hematokritområde:	35 – 50 %
Typ av bildskärm:	Stor LCD-skärm
Minne:	300 testresultat med datum och tid
Dimensioner:	48 x 78 x 17 mm
Vikt:	34g (inkl. batterier)
Batteri:	1 x CR 2032 3V litiumknappcells batteri
Batteritid:	1000 tester kontinuerlig användning eller 1 år
Automatisk avstängning:	Efter 1,5 minuter av icke användning
Temperatur:	10°C till 40°C
Relativ luftfuktighet :	Mindre än 85%
Förvaring:	Mätare vid -20°C - 60°C Teststickor vid 4°C - 30°C

För ytterligare information, se bipacksedel Wellion CALLA teststickor.
Mätning av alternativa stickställen (AST) underarm möjlig.

SYMBOLER



(EXP) Utgångsdatum (används till den sista i denna månad)



Använd inte om förpackningen är skadad



(LOT) Batchnummer



Förvaras torr



Temperaturområde



Tillverkare



Se bruksanvisningen

FOR SELF-
TESTING

In vitro diagnostik, Medicinsk utrustning för självtestning



In vitro-diagnostisk medicinsk utrustning



Försiktighet, se medföljande dokument



Artikelnummer



Förvaras inte i direkt solljus/direkt ljus



Får ej återanvändas

Software Version Calla_Mini_01_20130717 Version 1.00

wellion[®]

CALLA*mini*



MEDTRUST Handelsges.m.b.H.
Gewerbepark 10
7221 Marz
AUSTRIA
www.medtrust.at

CE 0197



In vitro-diagnostiskt
medicinsk produkt

W932MSEMM RevB 04/2017

© MEDTRUST, Wellion and CALLA are registered trademarks.