

# wellion<sup>®</sup> **SENSOR**

14  
DAGAR

SYSTEM FÖR KONTINUERLIG  
GLUKOSÖVERVAKNING (rtCGM)



Österrikiskt familjeföretag & en pålitlig  
partner inom hälsovårdssektorn





# wellion<sup>®</sup> **SENSOR**

**SYSTEM FÖR KONTINUERLIG  
GLUKOSÖVERVAKNING (rtCGM)**


## *Jag formar mitt liv*

Du bestämmer placeringen av din sensor!

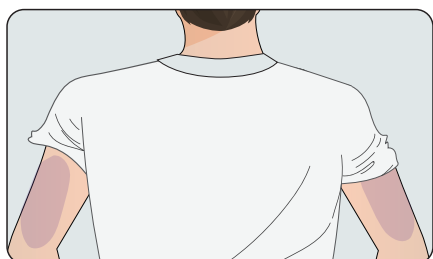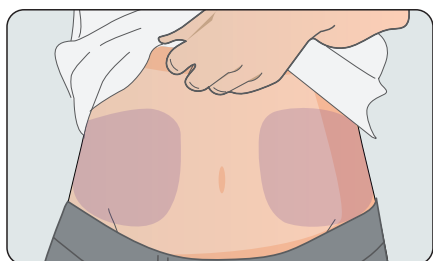


Wellion<sup>®</sup>-sensorn kan fästas på många olika delar av kroppen för att passa ditt dagliga schema eller klädsel (t.ex. mage, överarm,...).

## ENKEL UPPSTART

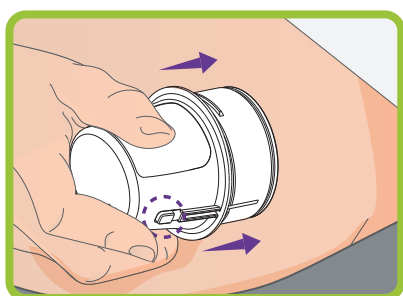

**1**

Tryck applikatorn så långt det går mot huden och tryck sen på frigöringsknappen.

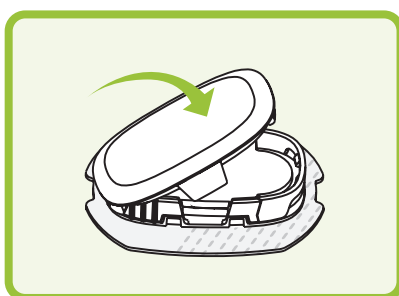

**2**

Koppla på sändaren i sensorbasen.



**3**

Ladda ner Wellion Aidex SENSOR app. Para sändaren och läs resultaten.

Ditt ÖSTERRIKISKA hälsovarumärke

## DISKRET MÄTNING AV DINA GLUKOSNIVÅER

Tack vare den **lilla platta designen** kan CGM-sensorn bäras diskret.



Se ditt glukosvärde enkelt och diskret även på resande fot. Genom trådlös dataöverföring kan du snabbt och enkelt se dina värden.

Ladda ner  
Wellion AiDEX SENSOR-app



mmol/L



mmol/L



 **Bluetooth**  
(2 meter)



**Info:** Data överförs automatiskt även om mottagaren varit utom räckhåll.

# wellion<sup>®</sup> ***SENSOR***

**SYSTEM FÖR KONTINUERLIG  
GLUKOSÖVERVAKNING (rtCGM)**

## ENKEL DATAÖVERFÖRING

Så fort Wellion<sup>®</sup> SENSOR fästs på kroppen mäter den kontinuerligt och automatiskt din glukosnivå.

**Wellion<sup>®</sup> AiDEX SENSOR-app** imponerar genom sin **intuitiva menynavigering** och möjliggör detaljerad **datahantering**.



## RESURSVÄNLIG OCH EXAKT

**Wellion SENSOR** byts minst var 14:e dag.  
Sändaren används i upp till 4 år.

## Ditt ÖSTERRIKISKA hälsovarumärke

## ALLT NÄRA TILL HANDS


Med **Wellion® AiDEX SENSOR**-app kan du enkelt läsa av ditt mätresultat – tillgängligt för Android och iOS. Appen samlar in all viktiga data som är relaterad till din diabetes.

Ställ in ditt individuella målintervall för glukos – om det uppmätta glukosvärdet är under eller över ditt målintervall, utlöses ett larm.

**Detaljerad CGM-rapport** som PDF för behandlande läkare.

**Delningsfunktionen** låter de personer du litar på att alltid ha en inblick i dina glukosvärden. Härigenom kan du förbättra din diabeteshantering och få ett mer bekymmerslöst liv genom larmfunktionerna.

Om du inte vill arbeta med appen, fråga din vårdgivare om en separat Wellion® SENSOR PDA (Portabel Diabetesassistent).

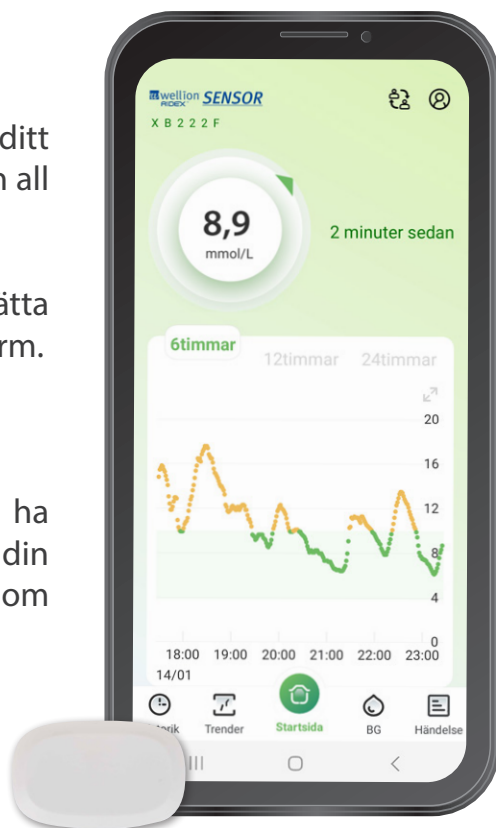

## CGM rapport

### Grundläggande information:

Namn : --  
Typ av diabetes : --  
E-post : --

Kön :  
Längd : --  
Serienummer: AH0K2N

Ålder: --  
Vikt: --

### CGM-mått

Produkt	Enhet	Resultat	Referensvärde
CGM Utvärderingsdagar	Dag (ar)	7	>14
CGM täckningstid	%	38.69	>70
eHbA1c	%	4.62	<7
MBG (medelvärde för glukos)	mmol/L	4,9395	4,235 -6,6045
CV	%	10.15 ↓	18-36


### Time in Range (TIR)

Väldigt låg, 0.07%

0.02 timme (timmar)

Låg, 2.77%

0.66 timme (timmar)

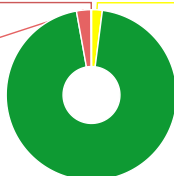

Hög, 2.06%

0.49 timme (timmar)

Normal, 95.09%

22.82 timme (timmar)

Mycket hög: Tid över intervallet (TAR) : >13,88 mmol/L

Hög: Tid över intervallet (TAR) : 9,99 - 13,88 mmol/L

Normal: Time in Range (TIR) : 3,89 - 9,99 mmol/L

Låg: Tid under intervallet (TBR) : 2,997- 3,885 mmol/L

Mycket låg: Tid under intervallet (TBR) : < 2,97 mmol/L

# wellion<sup>®</sup> ***SENSOR***

**SYSTEM FÖR KONTINUERLIG  
GLUKOSÖVERVAKNING (rtCGM)**

## **SPECIFIKATIONER**

	Sändare	Sensor
Driftstemperatur	5-40°C	
Luftfuktighet vid användning	10-93% (ej kondenserande)	
Lagrings- och transporttemperatur	-20 - 60°C	4 - 30°C
Fuktighet vid lagring och transport	5-95% (ej kondenserande)	
Vattentäthet	IP27: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten (upp till 1 meter djupt i 30 minuter).	
Livslängd	Garanterad livslängd: 4 år	14 dagar
Detektionsområde	2 mmol/l – 25 mmol/l	
Vikt	< 5,5 g	
Sändare ↔ App	Bluetooth	
MARD (Buk, överarm)	9.1 %	



**Wellion AiDEX  
SENSOR App mmol/L**



**Wellion SENSOR**



Ditt ÖSTERRIKISKA hälsovarumärke

## FÖRDELARNA I KORTHET



Kontinuerlig glukosmätning var 5:e minut –  
Du kommer att få 288 avläsningar per dag



Endast 1 timmes uppvärmningstid - sen får du det första värdet



Ingen kalibrering behövs



Wellion® SENSOR är vattentät (simning, dusch)



Mätvärden överförs automatiskt, ingen scanning behövs




Smärtfri mätning



Dela dina värden och varningar med dina anhöriga. Du kan  
även ta emot värden från personer du följer.

***Du kan individuellt forma ditt liv:***

***När du rör dig, sover, leker eller tränar.***

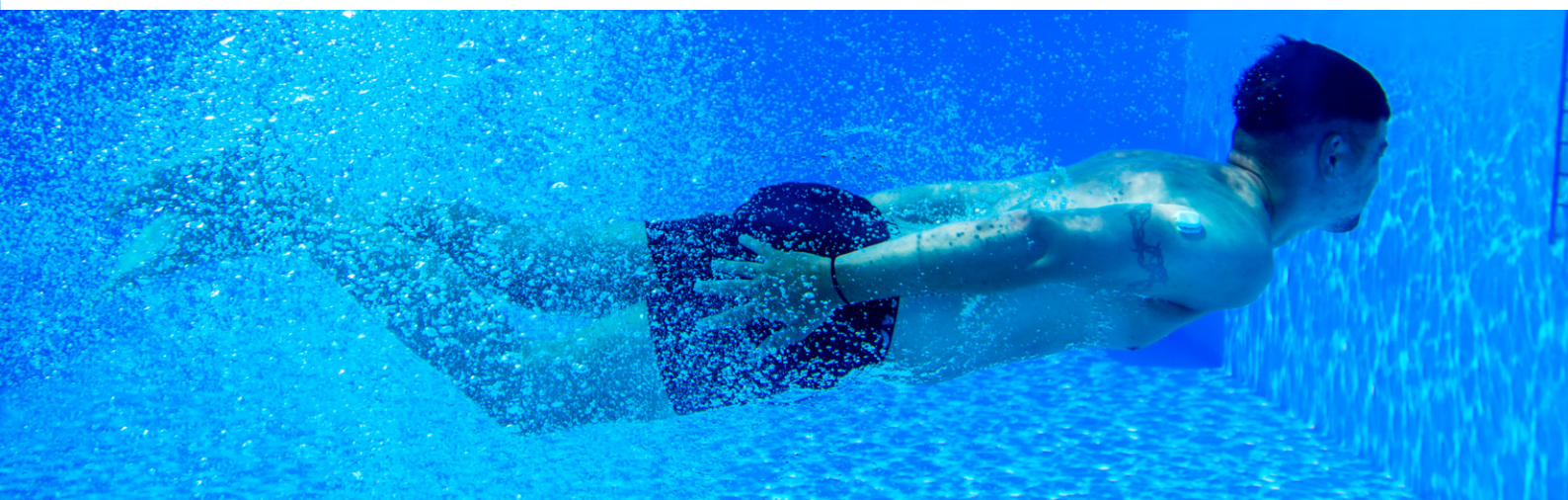

# wellion<sup>®</sup> **SENSOR**

14  
DAYS

**SYSTEM FÖR KONTINUERLIG  
GLUKOSÖVERVAKNING (rtCGM)**



Ditt  
**ÖSTERRIKISKA**  
hälsovarumärke

## FÖRDELARNA MED VÅR WELLION SENSOR



Vattentät vid nedsänkning  
under viss tid (IP27)



14 dagars sensor



Automatisk  
dataöverföring



Realtidsmätning



Flexibel livsstil



Användarvänlig handenhet



Kontinuerlig  
glukosmätning



Ingen kalibrering



Wellion AiDEX  
SENSOR App



**BESTÄLL DIREKT FRÅN MED TRUST:**

(+46) 040 / 15 77 75 eller [info@medtrust.se](mailto:info@medtrust.se)



Service och försäljning:



**MED TRUST Sweden AB**

Ridbanegatan 1

213 77 Malmö, SWEDEN

[www.medtrust.se](http://www.medtrust.se) & [www.wellion.se](http://www.wellion.se)

Tel.: (+46) 040 / 15 77 75

E-Mail: [info@medtrust.se](mailto:info@medtrust.se)