


# wellion<sup>®</sup> **SENSOR**

**10**  
DAGAR

**SYSTEM FÖR KONTINUERLIG  
GLUKOSÖVERVAKNING (rtCGM)**

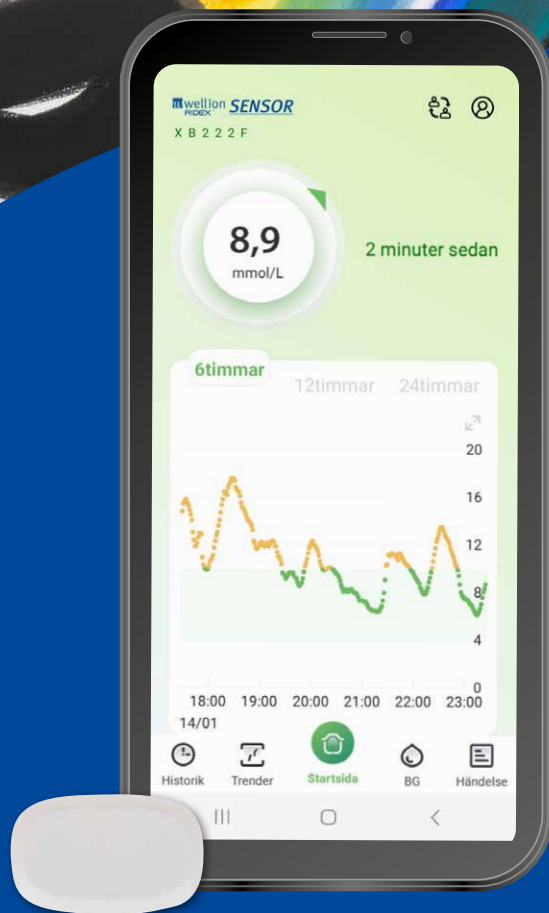

**Österrikiskt familjeföretag &  
en pålitlig partner till sjukvårdssektorn**





# Wellion<sup>®</sup> **SENSOR**

SYSTEM FÖR KONTINUERLIG  
GLUKOSÖVERVAKNING (rtCGM)


## Jag formar mitt liv

Du bestämmer placeringen av din sensor!

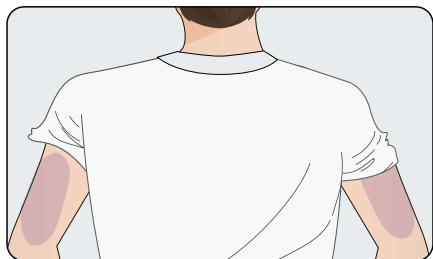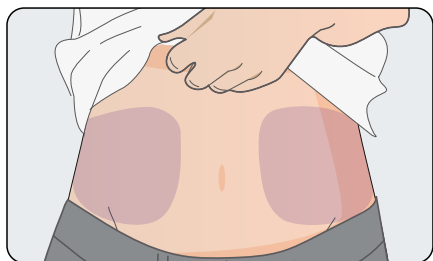


Wellion<sup>®</sup>-sensorn kan fästas på många olika delar av kroppen för att passa ditt dagliga schema eller klädsel (t.ex. mage, överarm,...).

## ENKEL UPPSTART

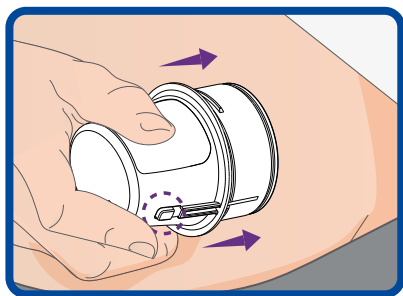

**1**

Tryck applikatorn så långt det går mot huden och tryck sen på frigörningsknappen.

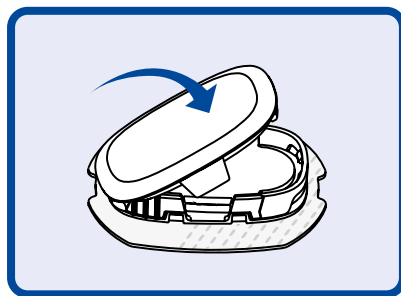

**2**

Koppla på sändaren i sensorbasen




**3**

Ladda ner Wellion Aidex SENSOR app. Para sändaren och läs resultaten.

Your AUSTRIAN health brand

## DISKRET MÄTNING AV DIN GLUKOSNIVÅ

Tack vare den **lilla platta designen** kan CGM-sensorn bäras diskret.

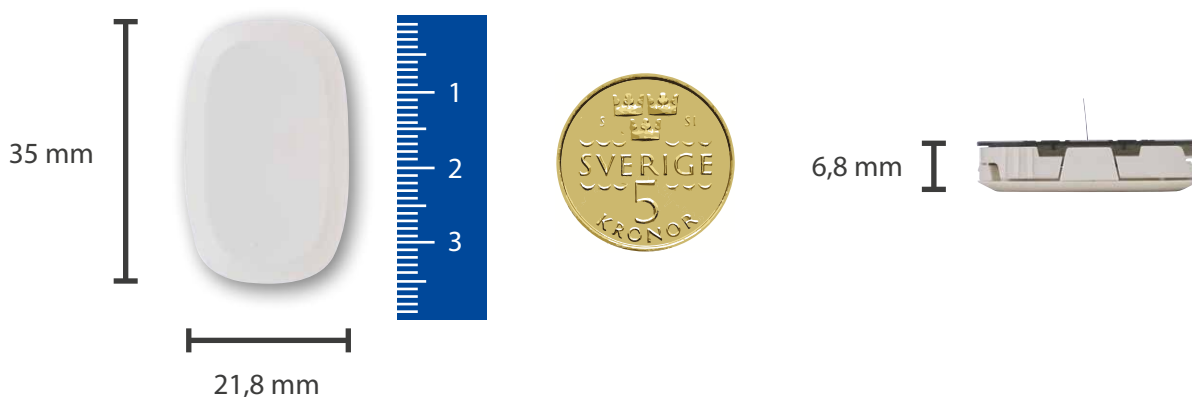


Se ditt glukosvärde enkelt och diskret även på resande fot. Genom trådlös dataöverföring kan du snabbt och enkelt se dina värden.

Ladda ner  
Wellion AiDEX  
SENSOR App (mmol/L)



Google play App Store

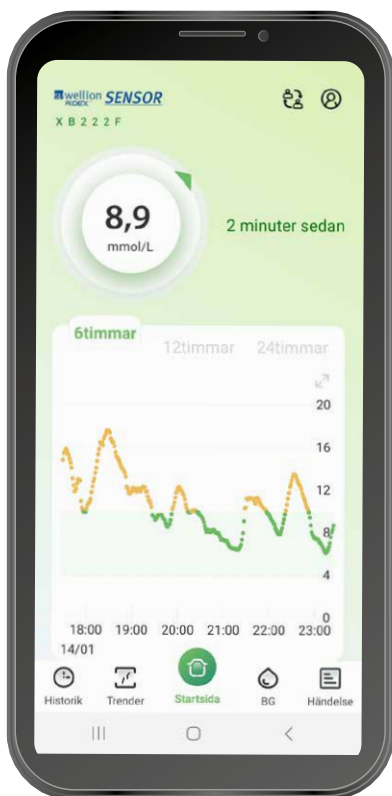

Bluetooth  
(2 meter)



**Info:** Data överförs automatiskt även om mottagaren varit utom räckhåll.

# wellion<sup>®</sup> ***SENSOR***

**SYSTEM FÖR KONTINUERLIG  
GLUKOSÖVERVAKNING (rtCGM)**

## ENKEL DATAÖVERFÖRING

Så fort Wellion<sup>®</sup> SENSOR fästs på kroppen mäter den kontinuerligt och automatiskt din glukosnivå.

Wellion<sup>®</sup> AiDEX SENSOR-app imponerar genom sin **intuitiva menynavigering** och möjliggör detaljerad **datahantering**.



## RESURSVÄNLIG OCH EXAKT

Wellion<sup>®</sup> SENSOR byts minst var tionde dag.  
Sändaren används i upp till 4 år.

Your AUSTRIAN health brand


## ALLT NÄRA TILL HANDS

Med Wellion® AiDEX SENSOR-app kan du enkelt läsa av ditt mätresultat – tillgängligt för Android och iOS. Appen samlar in all viktiga data som är relaterad till din diabetes.

Ställ in ditt individuella målintervall för glukos – om det uppmätta glukosvärdet är under eller över ditt målintervall, utlöses ett larm.

Detaljerad CGM-rapport som PDF för behandlande läkare.

Delningsfunktionen låter de personer du litar på att alltid ha en inblick i dina glukosvärden. Härigenom kan du förbättra din diabeteshantering och få ett mer bekymmerslöst liv genom larmfunktionerna.

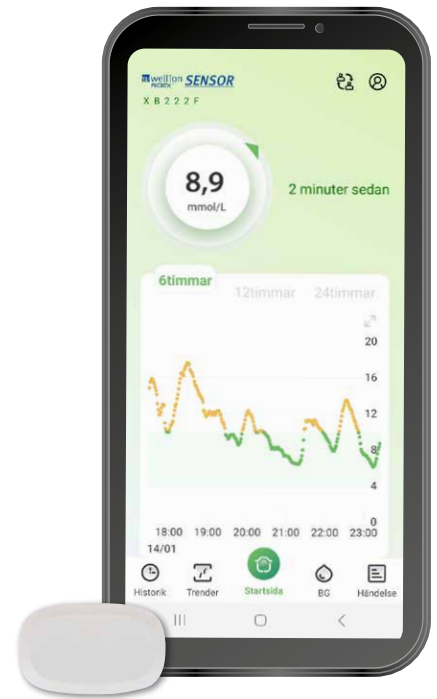

Om du inte vill arbeta med appen, fråga din vårdgivare om en separat Wellion® SENSOR PDA (Portabel Diabetesassistent).

## CGM rapport

### Grundläggande information:

Namn : --  
 Typ av diabetes : --  
 E-post : --


Kön :  
 Längd : --  
 Serienummer: AH0K2N

Ålder : --  
 Vikt : --

### CGM-mått

Produkt	Enhet	Resultat	Referensvärde
CGM Utvärderingsdagar	Dag (ar)	7	>14
CGM täckningstid	%	38.69	>70
eHbA1c	%	4.62	<7
MBG (medelvärde för glukos)	mmol/L	4,9395	4,235 -6,6045
CV	%	10.15 ↓	18-36

### Time in Range (TIR)

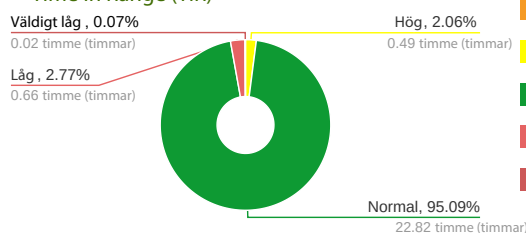

- Mycket hög: Tid över intervallet (TAR) : >13,88 mmol/L
- Hög: Tid över intervallet (TAR) : 9,99 - 13,88 mmol/L
- Normal: Time in Range (TIR) : 3,89 - 9,99 mmol/L
- Låg: Tid under intervallet (TBR) : 2,997- 3,885 mmol/L
- Mycket låg: Tid under intervallet (TBR) : < 2,97 mmol/L

# wellion<sup>®</sup> **SENSOR**

**SYSTEM FÖR KONTINUERLIG  
GLUKOSÖVERVAKNING (rtCGM)**

## **SPECIFIKATIONER**

	<b>Sändare</b>	<b>Sensor</b>
<b>Drifttemperatur</b>	5-40°C	
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10-93% (ej kondenserande)	
<b>Lagrings- och transporttemperatur</b>	-20 - 60°C	4 - 30°C
<b>Luftfuktighet vid lagring och transport</b>	5-95 % (ej kondenserande)	
<b>Skydd mot vatteninträngning</b>	IP27: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten (upp till 1 meter djupt i 30 minuter).	
<b>Livslängd</b>	Garanterad livslängd: 4 år	10 dagar
<b>Detektionsområde</b>	2 mmol/L - 25 mmol/L	
<b>Vikt</b>	< 5,5 g	
<b>Sändare ↔ App</b>	Bluetooth	
<b>MARD (mage, överarm)</b>	9,1 %	



**Wellion AiDEX  
SENSOR App**



**Wellion sensorbas +  
sändare**



Your AUSTRIAN health brand

## FÖRDELARNA I KORTHET



Kontinuerlig glukosmätning var 5:e minut –  
Du kommer att få 288 avläsningar per dag



Endast 1 timmes uppvärmningstid - sen får du det första värdet



Ingen kalibrering behövs



Wellion<sup>®</sup> SENSOR är vattentät (simning, dusch)



Mätvärden överförs automatiskt, ingen scanning behövs




Smärtfri mätning



Dela dina värden och varningar med dina anhöriga. Du kan även ta emot värden från personer du följer.

***Du kan individuellt forma ditt liv:***

***När du rör dig, sover, leker eller tränar.***

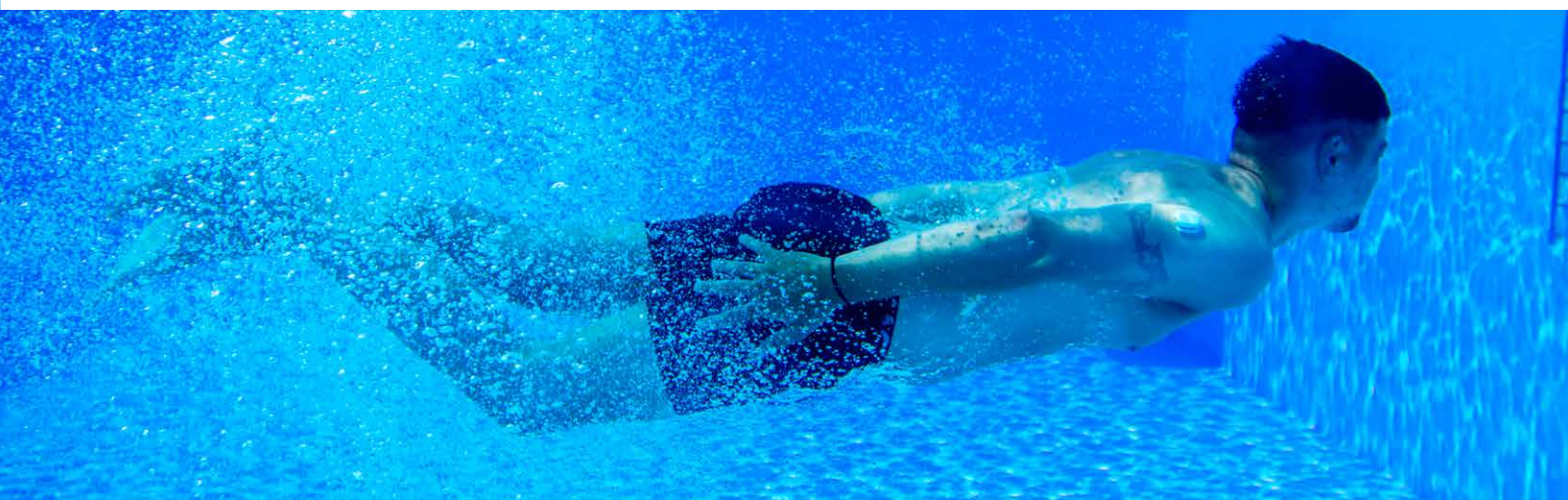

# wellion<sup>®</sup> SENSOR

AUSTRIA  
Your  
AUSTRIAN  
health brand

SYSTEM FÖR KONTINUERLIG  
GLUKOSÖVERVAKNING (rtCGM)

## FÖRDELARNA MED VÅR WELLION SENSOR



Vattentät vid nedsänkning  
under viss tid (IP27)



10 dagars sensor



Automatisk  
dataöverföring



Realtidsmätning



Flexibel livsstil



Användarvänlig handenhet



Kontinuerlig  
glukosmätning



Ingen kalibrering



Wellion AiDEX  
SENSOR App



**BESTÄLL DIREKT FRÅN MED TRUST:**

(+46) 040 / 15 77 75 eller [info@medtrust.se](mailto:info@medtrust.se)



Service och försäljning:



**MED TRUST Sweden AB**

Ridbanegatan 1

213 77 Malmö, SWEDEN

[www.medtrust.se](http://www.medtrust.se) & [www.wellion.se](http://www.wellion.se)

Tel.: (+46) 040 / 15 77 75

E-Mail: [info@medtrust.se](mailto:info@medtrust.se)